



BEFRIANDE ENKELT.

Navina™ Mini kan lindra dina tarmproblem.
En liten lösning för resultat direkt.

Navina™ Mini

NAVINA MINI KAN GE DIG FRIHET

Att ha problem med tarmen är påfrestande och något som vi sällan pratar om. Ofullständig tarmtömning till exempel, är mer vanligt än du tror. Det kan drabba både män och kvinnor och kan leda till avföringsläckage. De bakomliggande orsakerna kan variera, men symtomen är alltid obekväma och besvärliga.

Bara tanken på att riskera läckage, kan få många att stanna hemma och begränsa sitt sociala liv. Känner du igen dig? Då vill vi presentera Navina Mini. En enkel och diskret lösning som kan lindra dina problem med bara en lätt sköljning.


- ✓ en känsla av ofullständig tarmtömning
- ✓ problem med läckage

Be om en förskrivning

För att börja använda Navina Mini behöver du få en förskrivning från din vårdcentral eller läkare. Det behövs alltid en undersökning för att bekräfta att Navina Mini är lämplig för dig och säkerställa att du får den bästa lösningen. Tag med den här broschyren till besöket och fråga om Navina Mini. Det kan vara det du behöver.




ENKEL ATT KLÄMMA PÅ FÖR RESULTAT DIREKT

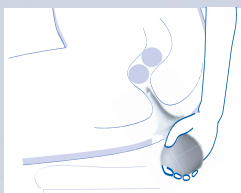


1

Sitt ner eller stå över toaletten.
För in konan i ändtarmen.

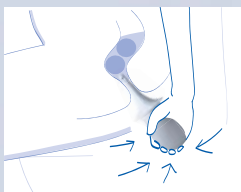

2

Skölj försiktigt genom
att klämma ihop
vattenbehållaren.

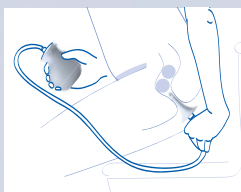

3

Valfritt: Du kan använda
förlängnings-
slangen om du vill.



För mer
information, scanna
koden med din
smartphone.



Hållbar design

- Vattenbehållaren kan användas upp till 60 gånger
- Rektalkonan är för engångsanvändning
- Förlängningsslangen (valfri) kan användas upp till 60 gånger
- Navina Mini är 100% fri från PVC och ftalater

SMART DESIGN GÖR DET ENKELT

Formad för att passa i handen

bekväm att hålla i och hantera.

Klämvänlig vattenbehållare

som rymmer 185 ml vatten

Rundad topp

för skonsamt införande.

Hygienisk

för bekväm användning.

Förlängningsslang

kan kopplas på för extra räckvidd.

Det finns en lösning, kontakta din vårdcentral eller läkare redan idag.
Läs mer, besök wellspect.se

Navina Mini

Avsedd användning

Navina Mini är avsedd för transanal irrigering genom att instillera en mindre volym vatten i rektum genom en rektalkona för engångsanvändning.

Indikationer

Navina Mini är avsedd för vuxna, ungdomar och barn från 3 år, som lider av ofullständig tarmtömning och/eller avföringsläckage.

Kontraindikationer

- Känd anal stenos
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit och divertikulär abscess
- Kolorektal cancer
- Ischemisk kolit
- Genomgått anal eller kolorektal operation för mindre än tre månader sedan

Den här listan är inte nödvändigtvis fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till användarens individuella omständigheter. Läs bruksanvisningen innan användning.



Tillverkare:
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, Box 14,
431 21 Mölndal, Sverige
Tel: 31 376 40 00.
www.wellspect.se




| Artikelnr | Benämning | Specifikation |
|-----------|---------------------------|--|
| 6931000 | Navina Mini Start Set | 1 vattenbehållare, 5 rektalkonor, 1 förlängningsslang |
| 6930700 | Navina Mini Set | 1 vattenbehållare, 30 rektalkonor, |
| 6930800 | Navina Mini Extension Set | 1 vattenbehållare, 30 rektalkonor, 1 förlängningsslang |
| 6930900 | Navina Mini Refill Set | 30 rektalkonor, |

Navina produkter för tarmskötsel. Ett komplett sortiment.




Navina Irrigeringsystem, det enda irrigeringssystemet med elektronisk eller manuell kontrollenhet, för kronisk förstoppning och/eller avföringsläckage.

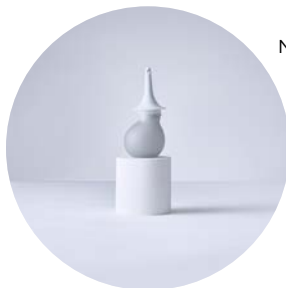

Navina Mini, vid ofullständig tarmtömning och/eller soiling.

Navina Insert, utvecklad för att förhindra avföringsläckage.

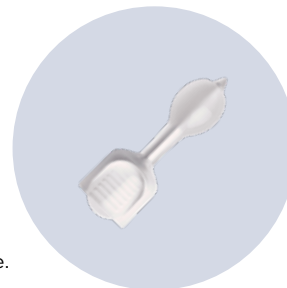

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmdysfunktion. Vi inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vårt mål är att våra produkter skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt och strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [Wellspect.se](https://www.wellspect.se).

Följ oss också på LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://www.wellspect.se)

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031 376 40 00. www.wellspect.se