

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect Healthcare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal. Tel: 031-376 40 00. www.wellspect.se

Navina irrigeringssystem

Användning

Navina Irrigeringsystem är avsett för Transanal Irrigering genom att tillföra vatten i nedre delen av tjocktarmen via en rektalkateter.

Indikationer

Navina Systems är avsedda för att hjälpa vuxna och barn från 3 år som lider av avföringskontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och rektum.

Kontraindikationer

Använd INTE Navina Irrigeringsystem om något eller några av följande tillstånd gäller för dig:

- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.
- Akut divertikulit
- Kolorektal cancer
- Ischemisk kolit
- Genomgått anal eller kolorektal operation för mindre än tre månader sedan
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan

Den här listan är inte nödvändigtvis fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till användarens individuella omständigheter. Läs bruksanvisningen innan användning.

Symboler



Tillverkare:
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, Box 14,
431 21 Mölndal, Sverige.
Tel: 031 376 40 00.
www.wellspect.com



2797

Rx Only

74052-SE-2023-05-09. © 2023 WELLSPECT. All rights reserved.



PEER SUPPORT-TAI
ERFARENHET
GER TRYGGHET



De bästa råden kan ibland komma ifrån någon som själv varit/självt är i samma situation som du

Tarmdysfunktion har ofta en enorm inverkan på vardagslivet. Att hitta en rutin som fungerar gör att du kan få kontroll, och det självförtroende du behöver, för att kunna göra allt det du vill.

De bästa råden kan ibland komma från någon som själv varit i samma situation som du med lång erfarenhet och kunskap inom området.

Med Peer Support-TAI erbjuder vi en personlig support från en användare till en annan. Supporten kan t.ex vara tips och trix, motivation, inspiration eller bara prata med någon i samma situation.

Inga medicinska råd kommer ges här, den ges enbart av medicinskt ansvarig.



Erfarenhet ger trygghet - Lennart och Renée är utbildade stödpersoner

De har olika bakgrund, men har transanal irrigering (TAI) och Navina™ irrigeringssystem som en gemensam nämnare med många års erfarenhet av både produkt och terapi.

Lennart och Renée har genomgått en utbildning i det coachande förhållningssättet samt utbildning i tarmens anatomi/fysiologi.

Läs mer om Lennart och Renée på vår hemsida.

Vill du veta mer eller anmäla dig till Peer Support-TAI

Gå in på wellspect.se eller scanna QR koden nedan.

Du kan även ringa till kundtjänst på telefon **031-376 40 20**

