

Produktinformation för Navina Classic

Produktbeskrivning

System för transanal irrigering med manuell kontrollenhet.

Hållbarhet och användningar

Alla komponenter i Navina Irrigation System har en hållbarhet på 3,5 år, utom Navina-katetrarna och Navina-konan som har en hållbarhet på 2 år. När Navina-komponenterna packas i set bestämmer den komponent som har kortast hållbarhet hela setets hållbarhet.

Navina-katetrar och -konor är avsedda för engångsbruk, vattenbehållaren kan användas 15 gånger och Navina Classic-kontrollenhet och -vattenslangset kan användas 100 gånger.

Materialsammansättning

Katetermaterial: SEBS (styren-etylen-butylen-styren)/PP (polypropen) med en hydrofil ytbeläggning av PVP (polyvinylpyrrolidon).

Primärt förpackningsmaterial: påse av PE/PET.

Sekundärt förpackningsmaterial: kartong och wellpapp.

Avsedd användning

Navina Systems är avsett för transanal irrigering genom att vatten tillförs till nedre delen av tjocktarmen med hjälp av en rektalkateter.

Indikationer för användning

Navina Systems är avsedda för att hjälpa vuxna och barn från 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma innehållet i nedre delen av tjocktarmen och ändtarmen.

Kontraindikationer

Använd **INTE** Navina Systems om något eller några av följande tillstånd gäller för dig:

- Känd anal eller kolorektal stenosis.
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått anal eller kolorektal operation för mindre än tre månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan.

Den här listan är inte nödvändigtvis fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till användarens individuella omständigheter.



Navina Classic System

Artikelnummer	Beskrivning	Specifikation
6900510	Navina Classic System Regular	1 Navina Classic-kontrollenhet
6900710	Navina Classic System Small	1 vattenbehållare
6901710	Navina Classic System-kona	1 vattenslangset 2 rektalkatetrar 1 Navina-väska 1 tillbehörsset
6900610	Navina Classic System Regular Refill	1 Navina Classic-kontrollenhet
6900810	Navina Classic System Small Refill	1 vattenbehållare
6901810	Navina Classic System Cone Refill	1 vattenslangset 2 rektalkatetrar
6900310	Navina förbrukningsset regular	1 vattenbehållare 15 rektalkatetrar
6900410	Navina-förbrukningsset small	
6901610	Navina-förbrukningsset med konor	
6894010	Navina Catheter Set Regular	10 rektalkatetrar
6894310	Navina-kateterset small	
6901110	Navina-vattenslangset	1 kateterslang 1 slang till vattenbehållare
6901200	Navina-tillbehör	2 greppringar (1 vertikal, 1 horisontell) 1 nackband 1 fästrem 1 fästklämma till Navina Smart-kontrollenhet
6901310	Navina Classic-kontrollenhet	1 Navina Classic-kontrollenhet

Navina™ Classic



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.se



Rx Only