

LoFric Origo – för män

LoFric® Origo™ hydrofil engångskateter med saltlösning för aktivering.

För blåsskötsel med ren intermittent kateterisering vid kort- eller långtidsanvändning.

LoFric skall endast användas efter förskrivning.

Innan användning säkerställ att de råd och instruktioner kring kateteriseringsproceduren som du fått av din vårdkontakt följs.

Läs bruksanvisningen i förpackningen för viktig information och fullständiga instruktioner.

Kontakta din förskrivare om du upplever problem.

A. Tips på förvaring innan användning.


Vikbar till fickformat.

Använd skåran för att hålla katetern vikt.



Användarinstruktioner

1. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
2. Kläm sönder behållaren med saltlösning för att aktivera katetern. Sedan är katetern klar att användas.
3. Dra ner remsan för att öppna.
4. VALFRITT: Använd klisterfliken på baksidan för att fästa förpackningen på en torr och ren yta.
5. Ta ut katetern.
VALFRITT: Greppa det rörliga handtaget intill konnektorn och justera för att kontrollera införandet utan att behöva ta på katetern.
6. Lyft penis upp mot magen. I denna position förlängs urinröret och blir U-format. Detta gör det lättare att styra katetern in i urinblåsan. För långsamt in katetern i urinröret. När urinen börjar rinna för in katetern något längre för att säkerställa att båda kateterögonen är inne i urinblåsan.
7. För ner penis i normalt läge igen, när urinen börjar rinna genom katetern.
8. När urinflödet avtar drar du långsamt tillbaka katetern en liten bit. Om urinen börjar rinna igen, vänta tills det har slutat för att säkerställa fullständig tömning av urinblåsan. Dra sedan ut katetern helt.
9. Lägg tillbaka katetern i förpackningen och släng som brännbart hushållsavfall.

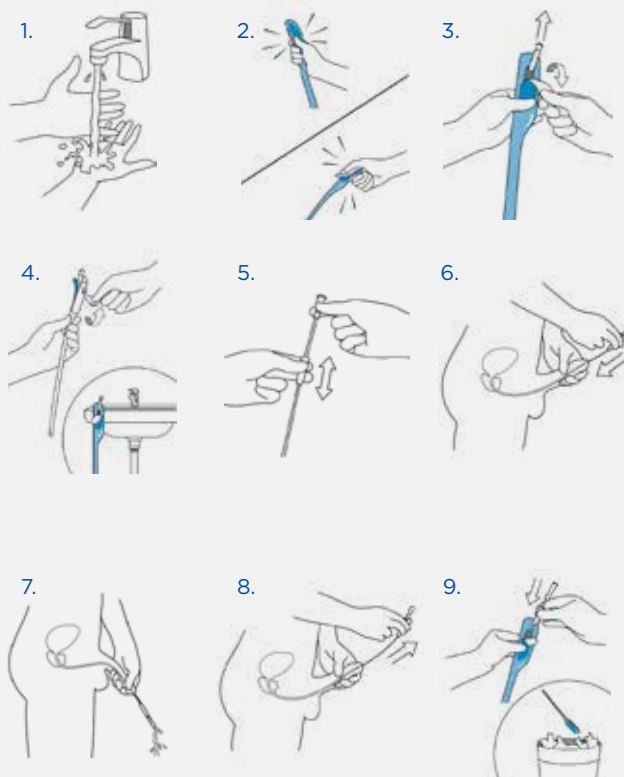

Särskilda instruktioner för Tiemann-kateter med böjd tipp.

En Tiemann kateter med böjd tipp kräver en speciell teknik vid kateterisering. Tala med din förskrivare för instruktioner och råd.

1. Notera var markeringen på konan befinner sig i förhållande till katetertippen när du för in katetern. Då säkerställer du att katetertippen har rätt riktning under kateteriseringen.
2. Se till att katetertippen är vänd upp mot buken vid införandet av katetern och under kateteriseringen eller följ de specifika instruktioner du fått av din förskrivare.

Tiemann/Coudé



På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric[®] och Navina[™]. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A real difference.

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT),

besök wellspect.se

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se



Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel 031 376 40 00. www.wellspect.se

LoFric



Tillverkare: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal
Tel: 031 376 40 00. www.wellspect.se

CE 2797

R_x Only