

## LoFric Primo – för kvinnor

LoFric® Primo™ hydrofil engångskateter med saltlösning för aktivering.

För blåsskötsel med ren intermittent kateterisering vid kort- eller långtidsanvändning.

LoFric skall endast användas efter förskrivning.


Innan användning säkerställ att de råd och instruktioner kring kateteriseringsproceduren som du fått av din vårdkontakt följs.

Läs bruksanvisningen i förpackningen för viktig information och fullständiga instruktioner.

Kontakta din förskrivare om du upplever problem.

### Användarinstruktioner

1. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
2. Veckla ut förpackningen. Håll förpackningen upprätt.
3. Vik ihop vattenbehållaren.
4. Kläm sönder behållaren med saltlösning för att aktivera katetern. Sedan är katetern klar att användas.
5. a) Öppna förpackningen, ta ut katetern för att kateterisera  
b) VALFRITT: öppna med införingshjälpmedel:  
Avlägsna vattenpåsen genom att riva vid markering "A". Riv vid markering "B". Använd den återstående förpackningsdelen som ett införingshjälpmedel. (Den här delen ger dig ett stadigt grepp och införningshjälp, så att du kan föra in katetern utan att röra vid den.)
6. Sära på blygdläpparna och lokalisera urinröret strax ovanför vaginalöppningen. Med den andra handen, för långsamt in katetern i urinröret.
7. När urinen börjar rinna, för in katetern något längre för att säkerställa att båda kateterögonen är inne i urinblåsan.
8. När urinflödet avtar, drar du långsamt ut katetern. Om urinen börjar rinna igen ska du vänta tills den har slutat för att säkerställa fullständig tömning av blåsan. Dra sedan ut katetern helt.
9. Lägg tillbaka katetern i förpackningen och släng som brännbart hushållsavfall.

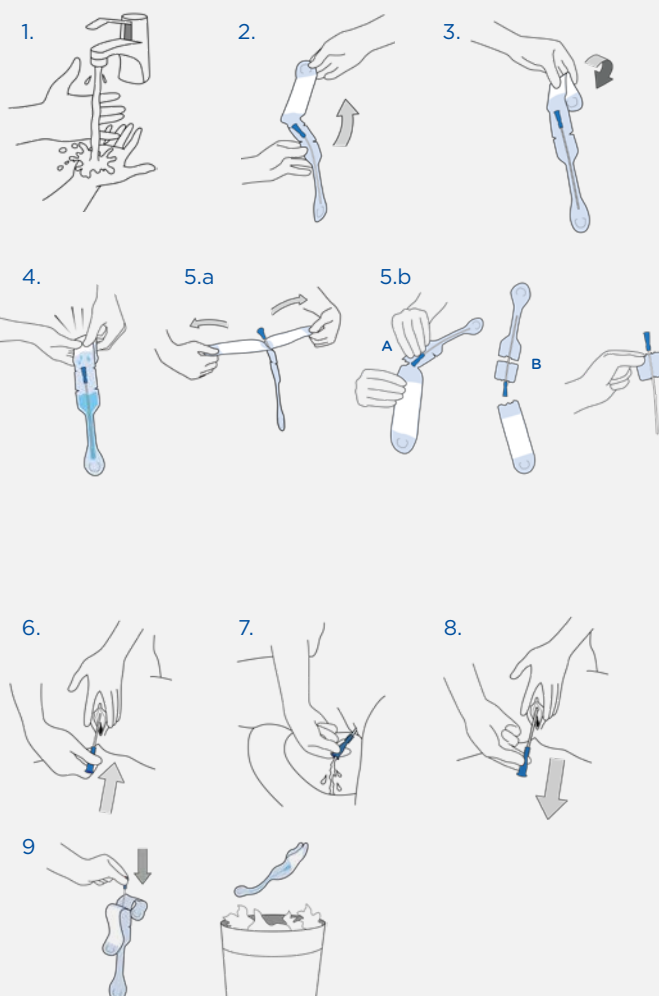

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. A real difference.**

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT),

besök [wellspect.se](https://wellspect.se)

Följ oss också på Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://wellspect.se)



LoFric



Tillverkare: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal  
Tel: 031 376 40 00. [www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

CE 2797

Rx Only