

## LoFric Hydro-Kit – för män

LoFric® Hydro-Kit™ hydrofil engångskateter med saltlösning för aktivering.

För blåsskötsel med ren intermittent kateterisering vid kort- eller långtidsanvändning.

LoFric skall endast användas efter förskrivning.


Innan användning säkerställ att de råd och instruktioner kring kateteriseringsproceduren som du fått av din vårdkontakt följs.

Läs bruksanvisningen i förpackningen för viktig information och fullständiga instruktioner.

Kontakta din förskrivare om du upplever problem.

### Användarinstruktioner

1. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
2. Håll katetern upprätt. Vik påsen med saltlösningen och tryck ihop. Låt saltlösningen rinna ned till katetern.
3. Vänd katetern upp och ned så att saltlösningen rinner ned i urinuppsamlingspåsen.
4. Använd öglorna vid fliken "A" för att öppna och frigöra kateterspetsen.
5. Använd öglorna vid fliken "B/C" för att öppna. Använd del "B" som införingshjälpmedel.
6. För att försluta mellan katetern och urinuppsamlingspåsen, dra försiktigt ut katetern ur förpackningen tills konnektorn kommer till ett stopp.
7. Lyft penis mot magen för att räta ut urinröret. För långsamt in katetern i urinröret. När urinen börjar rinna ska du föra in katetern något längre för att säkerställa att båda kateterögonen är inne i blåsan.
8. Vinkla penis nedåt när urinen börjar rinna genom katetern.
9. När urinflödet avtar, drar du långsamt ut katetern. Om urinen börjar rinna igen ska du vänta tills den har slutat för att säkerställa fullständig tömning av blåsan. Dra sedan ut katetern helt.
10. För tillbaka katetern ned i urinuppsamlingspåsen.
11. Innan du tömmer urinuppsamlingspåsen så knyt en knut på påsen. Riv sedan av vid fliken för att tömma påsen på urin. Släng som brännbart hushållsavfall.

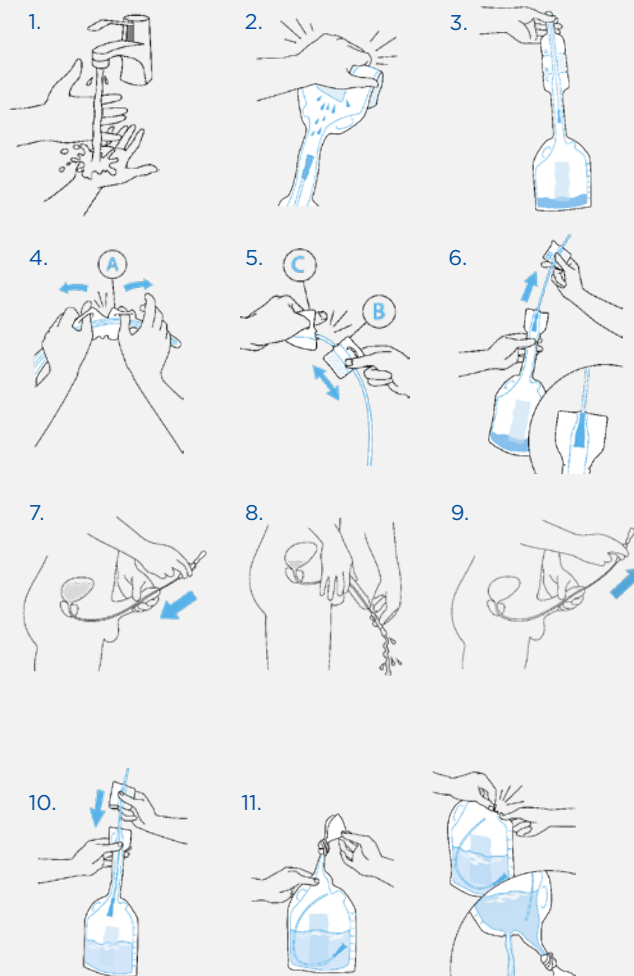


### Särskilda instruktioner för Tiemann-kateter med böjd tipp.

En Tiemann kateter med böjd tipp kräver en speciell teknik vid kateterisering. Tala med din förskrivare för instruktioner och råd.

1. Notera var markeringen på konan befinner sig i förhållande till katetertippen när du för in katetern. Då säkerställer du att katetertippen har rätt riktning under kateteriseringen.
2. Se till att katetertippen är vänd upp mot buken vid införandet av katetern och under kateteriseringen eller följ de specifika instruktioner du fått av din förskrivare.

### Tiemann/Coudé

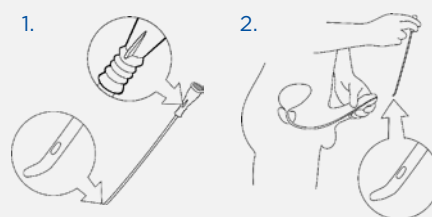

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric<sup>®</sup> och Navina<sup>™</sup>. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. En verklig skillnad.**

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök [wellspect.se](http://wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

[wellspect.se](http://wellspect.se)

